

SCHEMA TECNICA FEMOSTOP® II PLUS

Sistema di compressione meccanica per emostasi femorale

LOTTO 75

DISTRIBUTORE *St. Jude Medical Italia S.p.A.
Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, 16/1
20041 Agrate Brianza, Milano (Italia)*

FABBRICANTE *Radi Medical Systems AB
Palmbladsgatan 10
Box 6350; SE-751 35 Uppsala, Sweden*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Il sistema di compressione femorale FemoStop® II Plus è composto da: un manometro per il controllo della pressione, un arco di supporto per il fissaggio del dispositivo e da un set monouso costituito da una cupola pneumatica, una fascia e un rubinetto a tre vie., Posizionando la cupola di pressione in posizione caudale e mediale rispetto alla sede di puntura si esercita una pressione meccanica sull'arteriotomia per indurre l'emostasi.



INDICAZIONI D'USO

Il sistema di compressione meccanica femorale FemoStop® II Plus si utilizza per realizzare l'emostasi del sito di accesso a seguito di procedure percutanee arteriose e venose in pazienti sottoposti ad indagine angiografica diagnostica o interventistica; inoltre è indicato per la riparazione eco-guidata di pseudoaneurismi dell'arteria femorale.



ST. JUDE MEDICAL
MORE CONTROL. LESS RISK.

SCHEMA TECNICA FEMOSTOP® II PLUS

Sistema di compressione meccanica per emostasi femorale

LOTTO 75

SCHEMA TECNICA FEMOSTOP® II PLUS

Sistema di compressione meccanica per emostasi femorale

LOTTO 75

CARATTERISTICHE TECNICHE

dimensioni	
misura universale	
materiale	
arco	polipropilene
adattatore bilaterale	polipropilene
manometro	acciaio e gomma
adattatore bilaterale	polipropilene
cupola pneumatica	EVA (acetato di viniletilene)
fascia	poliestere non tessuto
rubinetto a tre vie	PS

NUMERO D'ORDINE

Numero d'ordine	Descrizione	Unità per confezione	Famiglia
11168	FemoStop II Plus arco	1	ITFS11168
11169	FemoStop II Plus adattatore bilaterale	1	ITFS11169
11170	FemoStop II Plus manometro	1	ITFS11170
11166	FemoStop II Plus set monouso (cupola pneumatica + cintura + rubinetto a tre vie)	10	ITFS11166



SCHEMA TECNICA FEMOSTOP® II PLUS

Sistema di compressione meccanica per emostasi femorale

LOTTO 75

INFORMAZIONI UTILI

- CLASSE DI APPARTENENZA: I
- CODICE ENTE NOTIFICATORE: 0413
- STERILIZZAZIONE: raggi gamma
- DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: la sterilità del prodotto conservato integro in luogo asciutto è garantita per 3 anni
- PRESENZA DI LATTICE: latex free
- DESCRIZIONE DEL CONFEZIONAMENTO:
 - set monouso: il confezionamento del sistema FemoStop® II Plus rispetta i requisiti delle normative EN868 ed EN980
 - arco e adattatore bilaterale: scatola in Tyvek®
 - manometro: scatola in cartone
- MODALITA' DI CONSERVAZIONE: conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce solare e dai raggi ultravioletti
- MODALITA' DI SMALTIMENTO: rifiuti ospedalieri nel rispetto delle normative vigenti
- CONFEZIONE:
 - set monouso: 10 unità
 - arco: 1 unità
 - adattatore bilaterale: 1 unità
 - manometro: 1 unità
- NUMERO DI REPERTORIO E CND:

CODICE PRODOTTO	NUMERO DI REPERTORIO	CND
11166	11372/R	C90010301
11168	11375/R	C90010301
11170	11378/R	C90010301