

# CUTICELL CLASSIC

## GARZE GRASSE STERILI ALLA PARAFFINA

<b>DESTINAZIONE D'USO</b>	Medicazione sterile neutra alla paraffina, con supporto a tramatura larga in garza di cotone. Il supporto ha una trama a fili intrecciati ritorti, per maggiore stabilità e resistenza alla sfilacciatura, ed è impregnato di paraffina gialla morbida.
<b>INDICAZIONI</b>	Medicazioni primarie di bassa aderenza, per il trattamento delle ferite essudanti (quali ustioni di I e II grado, lacerazioni, abrasioni, lesioni da radiazione, ulcere croniche dell'arto inferiore) e dei siti di trapianto cutaneo (sia donatore che ricevente)
<b>COMPOSIZIONE</b>	Supporto in garza a struttura intrecciata 100% cotone. Peso del supporto: $60\text{g/m}^2 \pm 10\%$ Unguento: Paraffina gialla morbida. Peso dell'unguento: $250\text{g/m}^2 \pm 10\%$ <b>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali che rappresentino un potenziale allergenico</b>
<b>CARATTERISTICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sterile</li> <li>• Di bassa aderenza quindi non interferisce con lo strato superficiale della ferita e la rimozione risulta atraumatica</li> <li>• La paraffina ha un effetto lenitivo sulla ferita</li> <li>• La trama larga è permeabile all'aria ed essudato, previene effetti occlusivi, e permette il filtraggio dell'essudato in eccesso ad una medicazione secondaria assorbente</li> <li>• La struttura a fili intrecciati ritorti riduce il rischio di rilasciare frammenti di filo nella ferita, anche se la medicazione viene tagliata durante l'applicazione</li> <li>• Facile e veloce da usare</li> <li>• Disponibile in diverse misure e confezionamenti</li> </ul>
<b>STERILIZZABILITA'</b>	Il prodotto è fornito sterile, sterilizzato a raggi Gamma.
<b>DURATA DELL'APPLICAZIONE</b>	Breve termine
<b>CONFEZIONAMENTO</b>	Unità d'uso e di vendita: medicazioni in diversi confezionamenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- medicazioni in busta singola sterile per singola applicazione</li> <li>- medicazione sterile lunga 7 metri piegata a zig-zag confezionata in dispenser in plastica;</li> <li>- in dispenser di medicazioni multiple sterili, in modo da facilitarne l'applicazione su vaste parti del corpo, nei casi in cui sia necessario usare più medicazioni in un'unica applicazione.</li> </ul> Ogni confezione ha il marchio CE e codice a barre. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara.
<b>CONSERVAZIONE E DURATA</b>	Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di luce e di calore. Conservazione e trasporto: temperatura massima di 25°C e 60% umidità relativa. La durata del prodotto correttamente conservato in confezione integra è di 3 anni.
<b>MODALITA' DI SMALTIMENTO</b>	Smaltire secondo le procedure previste dalle normative vigenti
<b>CODICE CND</b>	M02030201 Garze paraffinate
<b>NUMERO DI REPERTORIO</b>	48007/R
<b>MARCHIO CE</b>	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe IIb
<b>PRODUTTORE</b>	Prodotto da BSN medical GmbH & Co. KG, Amburgo, Germania, e distribuito in Italia da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041 Agrate Brianza (MI)

# CUTICELL CLASSIC

## GARZE GRASSE STERILI ALLA PARAFFINA

Continuazione/2

<b>CODICI</b>	<b>MISURA</b>	<b>UNITA' D'USO</b>	<b>CONF. PRIMARIA (unità di vendita)</b>	<b>CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)</b>
72538-00000-00	5cm x 5cm	1 garza	5 buste da 1 garza	120 confezioni
72538-00001-00	5cm x 5cm	1 garza	50 buste da 1 garza	12 confezioni
72538-00002-00	10cm x 10cm	1 garza	10 buste da 1 garza	60 confezioni
72538-00003-00	10cm x 10cm	1 garza	100 buste da 1 garza	6 confezioni
72538-00004-00	10cm x 40cm	1 garza	10 buste da 1 garza	30 confezioni
<b>Dispenser</b>				
72538-00005-00	10cm x 10cm	36 garze	36 garze	12 confezioni
72538-00006-00	10cm x 7m	1 zig zag	1 zig zag	12 confezioni
<b>Rotolo</b>				
72538-00007-00	15cm x 2 m	1 rotolo	1 rotolo	24 rotoli

BSN medical S.r.l.  
Un Procuratore

Ultimo aggiornamento: 25/02/2009 Dr. Giovanni Zambra

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.