

SCHEDA TECNICA

1010 66

BSN medical

DELTA LITE PLUS

BENDA SINTETICA PER IMMOBILIZZAZIONE IN FIBRA DI VETRO

DESCRIZIONE E INDICAZIONI D'USO	Benda in fibra di vetro e resina poliuretana durevole e leggera per il confezionamento di apparecchi gessati.
SUPPORTO	Maglia di fibra di vetro
RESINA	Poliuretana idrofila a bassa appiccicosità
CARATTERISTICHE TECNICHE	<p><u>Tempo di lavorazione:</u> min 30 sec(dopo immersione per 5 secondi in acqua a 20°C)</p> <p><u>Lunghezza benda:</u> in tensione: 3,6m</p> <p>Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice naturale) che rappresentino un potenziale allergenico. Tuttavia per sua natura il prodotto stesso non deve essere messo a contatto diretto con la cute, ma è opportuno preparare il distretto da immobilizzare con maglia ed imbottitura sottogesso per proteggere il paziente nelle fasi del trattamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima della vulcanizzazione – poiché la componente di resina, prima dell'attivazione, è potenzialmente irritante se posta a diretto contatto cutaneo. • Durante il procedimento di attivazione: poiché questo scatena in ogni caso una leggera esotermia (temperatura max raggiungibile di 47°C) • A presa avvenuta: per evitare possibili abrasioni dovute alla natura del supporto. • Durante la rimozione: come protezione dal calore generato dalla sega ortopedica e in tutti i casi dagli utensili da taglio utilizzati
PUNTI DI FORZA	<ul style="list-style-type: none"> - Modellamento facile grazie all'elasticità multidirezionale - Buona permeabilità al vapore acqueo - Resistente e leggero
STERILITA'	Il prodotto è fornito non sterile e non è sterilizzabile.
CONFEZIONAMENTO	<p>Unità d'uso: Singola benda confezionata in busta ermetica di alluminio</p> <p>Unità di vendita: confezione da 10 bende in buste individuali</p> <p>L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara</p>
CONSERVAZIONE E SCADENZA	<p>Il prodotto deve essere conservato al riparo dalla luce ad una temperatura inferiore a 25°C.</p> <p>La vita utile del prodotto correttamente conservato e in confezione integra è di due anni.</p>
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M03050202
N° DI REGISTRAZIONE	22623/R
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical GmbH, Hamburg. e distribuito da BSN medical S.r.l., Viale Colleoni 17, 20041, Agrate Brianza (MI)

CODICI	DIMENSIONI	COLORE	UNITA' D'USO	CONF. PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONF. SECONDARIA (imballo di magazzino)
73458-00000-00	2.5cmx1.8m	BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00001-00	5cmx3.6m	BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00002-00	7.5cmx3.6m	BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00003-00	10cmx3.6m	BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00004-00	12.5cmx3.6m	BIANCO	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00050-00	5cmx3.6m	COL. MISTI	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00051-00	7.5cmx3.6m	COL. MISTI	1 benda	10 bende	10 bende
73458-00052-00	10cmx3.6m	COL. MISTI	1 benda	10 bende	10 bende

BSN medical S.r.l.

Ultimo aggiornamento: 07/01/2009

Dr. Giovanni Zambra